

Čištění a sterilizace KaVo turbinových (MULTiflex) instrumentů



1

Sejměte turbínu z rychlospojky MULTiflex.



2

Vyjměte z upínací kleštiny vrtáček / nástroj.



3

Turbínu z vnějšku ošetřete a vydezinfikujte.
(Dbejte na doporučení KaVo a důležitá upozornění.)



4


Instrumenty s tímto symbolem lze čistit termodezinfekcí.
(Dbejte na doporučení KaVo a důležitá upozornění.)



5.1

Ruční ošetření KaVo Sprejem 2112


Nasadte turbínu na turbínový adaptér KaVo spreje a 1 vteřinu nechejte prostříknout. Při silnějším znečištění prostříknutí opakujte. Nepoužívejte jiné čisticí prostředky!

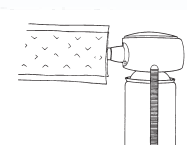

5.2

Strojové ošetření KaVo Sprej Rotorem 2103 N

Nasadte turbínu na MULTiflex adaptér Sprej Rotoru a aplikujte olej. Pro samostatné ošetření hlavičky je k dispozici speciální nástavec. (Detaily jsou uvedeny v návodu k použití u Sprej Rotoru).

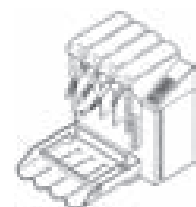

5.3

Strojové automatické ošetření KaVo QUATTROcare 2104 / 2104 A

Nasadte instrument na INTRA násadec v QUATTROcare. Pro samostatné ošetření hlavičky je k dispozici spec. nástavec pro uchycení hlavičky. Zavřete přední kryt a zapněte automatický ošetřovací cyklus stiskem tlačítka START. Po ukončení čistícího cyklu instrument a hlavičku z vnějšku otřete a sejměte z nástavců v přístroji. (Detaily jsou uvedeny v návodu k použití QUATTROcare).



6

Turbínu sterilizujte při max. teplotě do 135°C v parním sterilizátoru (autoklávu). Po sterilizaci turbínu co nejdříve vyjměte ze sterilizátoru, předejdete tím výskytu eventuelních funkčních poruch.




7

Před dalším použitím nechte turbínku 20 minut odstát hlavičkou nahoru nebo nasadte turbínu na MULTiflex rychlospojku, nechejte několik vteřin běžet naprázdno a setřete olej, který by mohl eventuelně z turbíny vytéct.


Důležité:

K čištění upínacího systému nejméně 1x týdně používejte INTRA adaptér s tryskou pro čištění upínací kleštiny. Upínání prostříkněte 1 vteřinu do otvoru pro vrtáček.

MULTiflex rychlospojka se v žádném případě nesterilizuje !!!

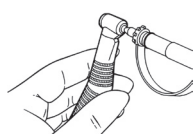

Čištění a sterilizace mikromot. (INTRAmatic) instrumentů

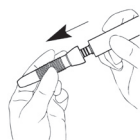


1

Sejměte násadec INTRAmatic z motoru.



2

Vyjměte z upínací kleštiny vrtáček / nástroj.

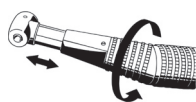

3

Hlavičku oddělte od spodního dílu a samostatně ji ošetřete.
(U nerozebíratelných spodních dílů - 25LP/CH/LP - se to neprovádí.)




4

Instrument a hlavičku z vnějšku očistěte a dezinfikujte.
(Dbejte na doporučení KaVo a důležitá upozornění.)



5

Instrumenty s tímto symbolem lze čistit termodesinfekcí.
(Dbejte na doporučení KaVo a důležitá upozornění.)

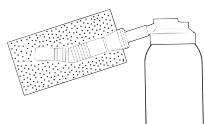

6.1



Ruční ošetření KaVo Sprejem 2112

Pro ošetřování INTRA instrumentů a hlaviček použijte INTRA adaptér na KaVo spreji. Při silnějším znečištění můžete ošetření zopakovat. Používat jiné ošetřovací prostředky není dovoleno.

Spodní díly / rovné násadce / nerozebíratelné násadce:

Nasadte je na příslušnou koncovku spreje a nechejte 1 vteřinu prostříknout.


Hlavičky: Nasadte na příslušný adaptér spreje a nechejte nejméně 1 vteřinu prostříknout.

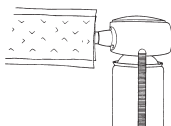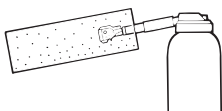

6.2

Strojové ošetření KaVo SPRAYrotorem 2103 N

Nasadte instrument na odpovídající adaptér na SPRAYrotoru a aplikujte olej. Pro samostatné ošetření hlavičky je k dispozici spec. nástavec. (Detaily jsou uvedeny v návodu k použití SPRAYrotoru).

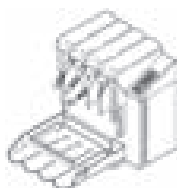

6.3


Strojové automatické ošetření KaVo QUATTROcare 2104 / 2104 A

Nasadte násadec na INTRAmatic adaptér v QUATTROcare. Zavřete přední kryt a zapněte automatický ošetřovací cyklus stiskem tlačítka START. Po ukončení čistícího cyklu násadec z vnějšku otřete a sejměte z adaptéru v přístroji. (Detaily jsou uvedeny v návodu k použití QUATTROcare).



7

Instrumenty a hlavičky sterilizujte například vložené ve sterilizačním sáčku při max. teplotě do 135°C v parním sterilizátoru (autoklávu). Po sterilizaci je co nejdříve vyjměte ze sterilizátoru, předejete tím výskytu eventuelních funkčních poruch.

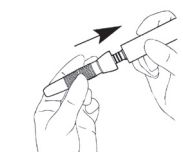

8

Před dalším použitím nechte násadec 20 minut odstát hlavičkou nahoru nebo nasadte násadec (hlavička nasazená ve spodním dílu) na mikromotor a nechejte ho chvíli běžet naprázdno. Setřete zbytek oleje, který by mohl eventuelně z násadce vytéct.

Důležité:

K čištění upínacího systému nejméně 1x týdně používejte INTRA adaptér pro čištění upínací kleštiny. Upínání prostříkněte min. 1 vteřinu do otvoru pro vrtáček.

Abyste předešli poškození motoru z přebytku oleje, sejměte alespoň 1x týdně kryt z motoru a motor otřete suchým hadříkem nebo vyfoukněte vzduchem z 3F stříkačky.

